



PROSEPT® – Termék katalógus





39 éves tapasztalat a fertőtlenítőszer gyártásában

A Hygiene360 1982-es alapítása óta a vállalat kiváló minőségű fertőzés-megelőző fertőtlenítő termékeket fejleszt és gyárt az egészségügyi szakemberek számára. Az elmúlt 39 év során a Hygiene360 nemcsak a gyorsan ható fertőtlenítő szerek széles skáláját fejlesztette ki, hanem innovatív fogyóeszközöket is bevezette, amelyek megvédik az egészségügyi dolgozókat a fertőzéstől.


A fertőzések ellenőrzése és megakadályozása az egészségügyi intézményekben egy folyamatos csata!

A Hygiene360 fertőtlenítőszeret és tisztítószeret gyárt kórházak, poliklinikák, sürgősségi és egészségügyi szolgáltatások valamint orvosi központok számára.

A nozokomiális fertőzések (kórház által szerzett fertőzések vagy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések) komoly aggodalomra adnak okot az egészségügyi ágazatban. A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Európai Központ (ECDC) becslései szerint az európai kórházak 18 betegből minden nap kialakul egy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés. Továbbá, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ jelentése alapján az átlagos túlsúly 7,1% volt azokban az európai országokban, ahol 4 131 000 beteget érintettek körülbelül 4544 100 egészségügyi betegség-epizódhoz társult fertőzés minden évben.

Az egészségügyi intézményeknél nagyobb a mikroorganizmusok átvitelének kockázata, ezért a fertőtlenítőszer gyártójaként a Hygiene360 fertőtlenítő és tisztítószer teljes választékát kínálja az említett egészségügyi létesítményeknek, intézményeknek.

Színkóddal a meghatározott munkaterületekhez

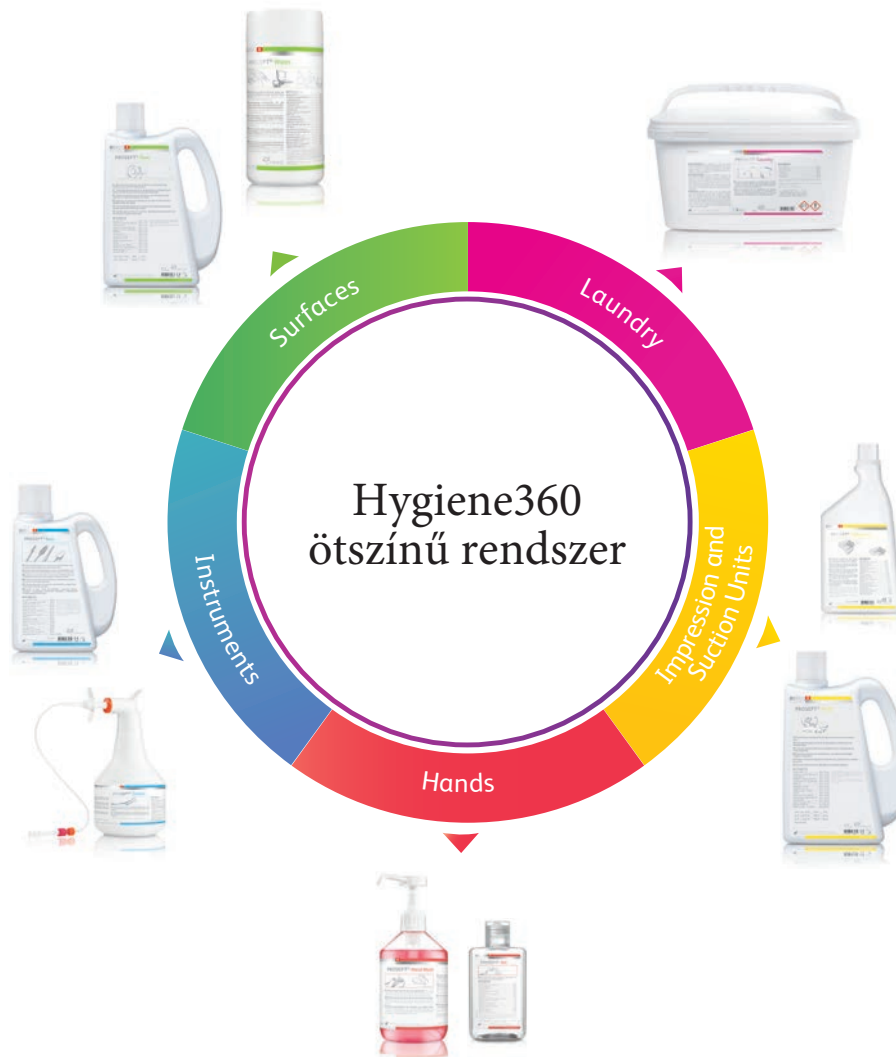

A fertőzések ellenőrzése és megelőzése során semmit nem szabad a véletlenre hagyni. Ez az oka annak, hogy a Hygiene360 átfogó, gyors és biztonságos termékeit színkóddal láttuk el alkalmazásuk szerint.

A PROSEPT® áttekintése

	Használatra kész	Koncentrátum	Behatási idő	150 ml	200 ml	575 ml	1 liter	2 liter	5 liter	1 kg	14,5 x 18 cm (Citromos illat)	14,5 x 20 cm (Klasszikus illat)	14,5 x 20 cm (Citromos illat)	14,5 x 40 cm (Klasszikus illat)	19,3 x 21 cm (Citromos illat)	19,3 x 24 cm (Citromos illat)	19,3 x 25 cm (Citromos illat)
Felülethez																	
PROSEPT® Spray	X		60 mp				X	X	X								
PROSEPT® Sensi	X		60 perc				X		X								
PROSEPT® Foam	X		60 perc		X												
PROSEPT® Wipes	X		60 mp									120 kendő	120 kendő				
PROSEPT® Jumbo Wipes	X		60 mp											100 kendő			
PROSEPT® Value Wipes	X		60 mp										120* vagy 250 kendő				
PROSEPT® Luxury Wipes	X		60 mp								165 kendő						
PROSEPT® Premium Wipes	X		60 mp												120 kendő		
PROSEPT® Floor		X	5 perc					X									
PROSEPT® Floor XL		X	60 perc						X								
Műszerekhez																	
PROSEPT® Fortis		X	15 perc				X	X	X								
PROSEPT® Pera		X	10 perc							X							
PROSEPT® Sonic		X	-				X										
PROSEPT® Burs	X		2 perc				X	X	X								
PROSEPT® Contra	X		5 perc			X											
Lenyomat és elszívó																	
PROSEPT® Jet Forte		X	-					X	X								
PROSEPT® Jet D		X	60 perc					X	X								
PROSEPT® Impression		X	60 mp				X										
PROSEPT® Impression S	X		60 mp				X										

A PROSEPT® áttekintése

	Használatra kész	Koncentrátum	Behatási idő	100 ml	230 ml	500 ml flakon adagoló pumpával	500 ml (EURO)	1 liter (EURO)	1 literes utántöltő tégely	2 liter	5 kg
Kéz											
PROSEPT® Hand Wash	X		-			X	X	X	X	X	
PROSEPT® Med	X		60 mp			X	X	X	X		
PROSEPT® Gel	X		60 mp	X		X	X	X	X		
PROSEPT® Hand Cream	X		-		X						
myArtisto MS-3 Fertőtlenítő adagoló			-						X		
myArtisto AS-3 Fertőtlenítő adagoló			-						X		
Mosószer											
PROSEPT® Laundry		X	30 perc								X

	1.3 ml kimenet	150 ml	500 ml flakon adagoló pumpával	500 ml (EURO)	1 liter (EURO)	1 liter	2 liter	3 liter	5 liter	10 liter	14,5 x 20 cm (100 darabos)	14,5 x 20 cm (120 darabos)	14,5 x 18 cm (165 darabos)	14,5 x 20 cm (250 darabos)	14,5 x 40 cm (100 darabos)	19,3 x 21 cm (120 darabos)	19,3 x 24 cm (165 darabos)	14,5 x 25 cm (225 darabos)	
Kiegészítők és alkalmazási segédeszközök																			
PROSEPT® Áztató tálca					X	X													
PROSEPT® Fúró áztató tálca	X																		
PROSEPT® Lenyomat áztató tálca					X														
PROSEPT® Kanna pumpa (20 ml)									X	X									
PROSEPT® Adagoló pumpa (20 ml)					X	X													
PROSEPT® Adagoló pumpa (3 ml)		X	X	X															
PROSEPT® Spray végződés C1	X																		
PROSEPT® Spray végződés I1	X																		
PROSEPT® Kanna tartály									X	X									
PROSEPT® Kendő doboz 1 (üres doboz)											X	X							
PROSEPT® Kendő doboz 2 (üres doboz)													X	X	X				
PROSEPT® Kendő doboz 3 (üres doboz)																X	X	X	



**Használatra kész fertőtlenítőszeresek
és tisztítószeresek kis felületekhez**

PROSEPT® Spray

Használatra kész megoldás nem invazív orvostechikai eszközök gyors és átfogó fertőtlenítésére.

- **Kevesebb mint 50% alkoholtartalom**

A fertőtlenítőszer különösen alkalmas érzékeny felületekre, például műbőr burkolatokra vagy akrilüvegre.

- **Nagy szerves terhelés mellett tesztelték**

A fertőtlenítőszer még akkor is hatékony, ha súlyos szerves szennyeződés, például vér vagy más testfolyadék van jelen.

- **Ergonómiai kialakítású flakon**

Az ergonómiailag kialakított palack biztosítja a fertőtlenítőszer biztonságos és egyszerű alkalmazását.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt. Ha spray-fertőtlenítést használ, viseljen maszkot. Teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszerű használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

Összetétel 100g-ban: 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g kvaterner ammóniumvegyületek

Kiszerezési egység: 1 literes palack flip top kupakkal, 2 literes flakon, 5 literes kanna

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6)	60 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	60 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtírtó (4,6)	60 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	60 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,9)	15 mp
BVDV (9)	15 mp
Koronavírus (9,10)	15 mp
Hepatitis B vírus (9)	15 mp
Hepatitis C vírus (9)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,9)	15 mp
HIV (9)	15 mp
A H3N2 influenza A vírus (9)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9)	15 mp
Virucid (9,12)	60 mp
5. típusú adenovírus (9)	60 mp
MNV norovírus (9)	30 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (9)	60 mp



PROSEPT® Sensi

Alkoholmentes, felhasználásra kész megoldás nem invazív orvostechnikai eszközök gyors és átfogó fertőtlenítésére.

- **Alkoholmentes**

Az alkoholmentes fertőtlenítőszer alkalmas érzékeny felületek és tárgyak, például ultrahangos szonda vagy akrilüveg fertőtlenítésére is.

- **Rövid expozíciós idő**

15 másodpercen belül inaktíválja a baktériumokat és vírusokat, mint például a HBV, a HCV és a HIV.

- **Hosszantartó antimikrobiális hatás**

Az antimikrobiális hatás a termék megszáradása után is megmarad, hatékonyan csökkentve az újraszennyeződés kockázatát.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt. Ha spray-fertőtlenítést használ, viseljen maszkot. Teljesen nedvesítse meg és törölje le a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. A biocidok felhalmozódásának elkerülése érdekében naponta egyszer, vízzel átitatott, egyszer használatos ruhával törölje le a bőrrel érintkező orvostechnikai eszközöket.

Összetétel 100 g-ban: 0,4 g benzalkónium-klorid, 0,4 g N-alkil-amino-propil-glicin

Kiszerezés : 1 literes flakon flip top kupakkal, 5 literes kanna

Alkohol mentes

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 perc
Mycobactericid (3)	60 perc
Élesztőtírtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10)	15 mp
BVDV (10)	15 mp
Koronavírus (9,10)	15 mp
Hepatitis B vírus (10)	15 mp
Hepatitis C vírus (8,10)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10)	15 mp
HIV (10)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (10)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)	15 mp
Virucid (10,11)	60 perc
5. Típusú adenovírus (10)	30 perc
MNV norovírus (10)	60 perc
1. típusú LSc-2ab poliovírus (10)	60 perc
A rotavírus Wa törzse (10)	30 mp



(1) EN 13727, (2) A. baumannii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) aktív az összes burkolt vírus ellen, (8) BVDV helyettesítő vírus, (9) FCov helyettesítő vírus, (10) EN 14476, (11), amely aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.

PROSEPT® Foam

Használatra kész hab az érzékeny felületekkel rendelkező orvostechnikai eszközök fertőtlenítéséhez, tisztításához és ápolásához.

- **Alkohol mentes**

Az alkoholmentes fertőtlenítőszer alkalmas érzékeny felületek és tárgyak, például ultrahangos szonda vagy akrilüveg fertőtlenítésére.

- **Rövid behatási idő**

15 másodpercen belül inaktíválja a baktériumokat és vírusokat, mint például a HBV, a HCV és a HIV.

- **Hosszantartó antimikrobiális hatás**

Az antimikrobiális hatás a termék megszáradása után is megmarad, hatékonyan csökkentve az újraszennyeződés kockázatát.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt. Vigyen fel habot a felületre, és száraz egyszer használatos ruhával terítse szét. Hagyja hatni az anyagot.


Összetétel 100 g-ban: 0,4 g benzalkónium-klorid, 0,4 g N-alkil-amino-propil-glicin

Kiszerezés: 200 ml habosító fejjel ellátott flakon

Alkohol mentes

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 perc
Mycobactericid (3)	60 perc
Élesztőtírtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10)	15 mp
BVDV (10)	15 mp
Koronavírus (9,10)	15 mp
Hepatitis B vírus (10)	15 mp
Hepatitis C vírus (8,10)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10)	15 mp
HIV (10)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (10)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)	15 mp
Virucid (10,11)	60 perc
5. típusú adenovírus (10)	30 perc
1. típusú LSc-2ab poliovírus (10)	60 perc
MNV norovírus (10)	60 perc
A rotavírus Wa törzse (10)	30 mp





**Fertőtlenítő és tisztító
koncentrátumok nagy
felületekhez**

PROSEPT® Floor

Kíméletes és gazdaságos folyékony koncentrátum az orvostechnikai eszközök nagy felületeinek fertőtlenítéséhez és tisztításához.

- **Rendkívül gazdaságos koncentrátum**

A rendkívül gazdaságos koncentrátum jelentősen csökkenti a fertőtlenítési költségeket.

- **Jó anyag kompatibilitás**

A termék alkalmas különféle padlóburkolatok és vízben mosható felületek fertőtlenítésére.

- **Egyszerű alkalmazás**

A fertőtlenítőszer-koncentrátumok gyors és egyszerű adagolásánál a mérőkupak segíti a mennyiségek beállítását.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget. A munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint készítse el. A helyes adagoláshoz használja a kupakban található mennyiségjelölést. Használjon törlőkendőt vagy moppot a fertőtlenítéshez és tisztításhoz a kezelendő felületeken. Ügyeljen arra, hogy a felület minden része teljesen meg legyen nedvesítve. Tartsa be a behatási időket. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja fel.

Összetétel 100 g-ban: 10 g kvaterner ammóniumvegyületek, parfümök, színezékek


Kiszerezés: 2 literes palack mérőkupakkal

Kíméletes

Baktericid (1)	2%-an	1 perc
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	2%-an	1 perc
Élesztőirtó (3,5)	2%-an	1 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (4)	2%-an	1 perc
Korlátozott spektrumú virucid (6,9)	2%-an	5 perc
BVDV (9)	2%-an	5 perc
Koronavírus (7,9)	2%-an	5 perc
Hepatitis B vírus (9)	2%-an	5 perc
Hepatitis C vírus (8,9)	2%-an	5 perc
1. típusú herpes simplex vírus (9)	2%-an	5 perc
HIV (9)	2%-an	5 perc
A H3N2 influenza A vírus (9)	2%-an	5 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9)	2%-an	5 perc
5. típusú adenovírus (9)	2%-an	1 perc
MNV norovírus (9)	2%-an	5 perc



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	1x  (= 20 ml) 2%
Víz	980 ml
Idő	5 perc



PROSEPT® Floor XL

Erős és gazdaságos folyadék koncentrátum a nagy orvosi eszközök felületének fertőtlenítésére és tisztítására.

• Rendkívül gazdaságos koncentrátum

A rendkívül gazdaságos koncentrátum jelentősen csökkenti a fertőtlenítési költségeket.

• Erőtéljes tisztítószer

Egy lépésben tisztítja és fertőtleníti a padlót.

• Jó anyag kompatibilitás

A termék alkalmas különféle padlóburkolatok és vízben mosható felületek fertőtlenítésére.

• Egyszerű alkalmazás

A fertőtlenítőszer-koncentrátumok gyors és egyszerű adagolásánál a mérőkupak segíti a mennyiségek beállítását.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget. A munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint készítse el. A helyes adagoláshoz használja a kupakban található mennyiségjelölést. Használjon törlőkendőt vagy moppot a fertőtlenítéshez és tisztításhoz a kezelendő felületeken. Ügyeljen arra, hogy a felület minden része teljesen meg legyen nedvesítve. Tartsa be a behatási időket. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja fel.

Összetétel 100 g-ban: 13,9 g N- (3-amino-propil) -N-dodecil-propán-1,3-diamin, anionos felületaktív anyagok, nemionos felületaktív anyagok, tisztítást fokozó anyagok, illatok, színezékek

Kiszerezés: 5 literes kanna

Szuper gazdaságos

Baktericid (1)	0.5%-an 10 perc
Antibiotikum-rezisztens bakt. (2)	0.5%-an 10 perc
Tuberkulocid (3)	1%-an 60 perc
Élesztőtírtó (4,6)	0.5%-an 5 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	0.5%-an 5 perc
Korlátozott spektrumú virucid (8,11)	1%-an 5 perc
BVDV (7,11)	0.25%-an 5 perc
Koronavírus (9,11)	1%-an 5 perc
Hepatitis B vírus (11)	1%-an 5 perc
Hepatitis C vírus (10,11)	0.25%-an 5 perc
1. típusú herpes simplex vírus (11)	1%-an 5 perc
HIV (11)	1%-an 5 perc
A H3N2 influenza A vírus (11)	1%-an 5 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (11)	1%-an 5 perc
5. típusú adenovírus (11)	1%-an 60 perc



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	1x ☐ (= 20 ml) 1%
Víz	1980 ml
Idő	60 perc





**Használatra kész
fertőtlenítő törlőkendők**

PROSEPT® Wipes

Hatékonyság 101 kórokozó ellen!

Effective in
60
Seconds



A legjobb fertőtlenítő törlőkendőink!

- Kompatibilis 275 anyaggal, beleértve a műbőrt is



A szilikon csillag alakú nyílás megakadályozza a törlők kiszáradását.



Tartós fedél



PROSEPT® Wipes 14.5
cm x 20 cm, 120 db



PROSEPT®
Premium Wipes
19.3 cm x 21 cm, 120 db



PROSEPT®
Luxury Wipes
14.5 cm x 18 cm, 165 db



PROSEPT®
Value Wipes
*14.5 cm x 20 cm, 120 db
14.5 cm x 20 cm, 250 db

* 2019. augusztusban érhető el

PROSEPT® Wipes

Használatra kész törölkendők a nem invazív orvostechnikai eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez.

- **Használatra kész nedves törölkendők**

A törölkő használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét, amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

- **Erősen telített törölkendők**

A fertőtlenítő törölkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt dobozban.

- **Maradék-mentes száradás**

Nem hagy csikokat, ami azt jelenti, hogy nincs szükség további törlésre.

Termékhasználat: Védekezésékként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le az utántöltő tasakot. Húzza az első törölt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törölkendőt. A törölvél teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerezés:

Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törölkendővel (14,5 x 20 cm), klasszikus illatú

Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törölkendővel (14,5 x 20 cm), citrom illatú

PROSEPT® törölkendő doboz T1 (üres doboz)

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtírtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11)	15 mp
BVDV (7,11)	15 mp
Koronavírus (9,11)	15 mp
Hepatitis B vírus (11)	15 mp
Hepatitis C vírus (10,11)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11)	15 mp
HIV (11)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11)	15 mp
Ankara (MVA)Vaccinia vírus törzs (11)	15 mp
Virucid (11,12)	60 mp
5. típusú adenovírus (11)	60 mp
MNV norovírus (11)	60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11)	60 mp
Rotavírus Wa törzs (11)	30 mp



PROSEPT® Jumbo Wipes

Használatra kész törlőkendők a nem invazív orvostechnikai eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez.

- **Használatra kész nedves törlőkendők**

A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét, amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

- **Erősen telített törlőkendők**

Egy kendő elegendő az 1 m²-nél nagyobb terület fertőtlenítéséhez újratöltés nélkül.

- **Maradék-mentes száradás**

Nem hagy csíkokat, ami azt jelenti, hogy nincs szükség további törlésre.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerezés:

Utántöltő tasak 100 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 40 cm), klasszikus illattal
PROSEPT® T2 törlőkendő doboz (üres doboz)

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtirtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11)	15 mp
BVDV (7,11)	15 mp
Koronavírus (9,11)	15 mp
Hepatitis B vírus (11)	15 mp
Hepatitis C vírus (10,11)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11)	15 mp
HIV (11)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírustörzs (11)	15 mp
Virucid (11,12)	60 mp
5. típusú adenovírus (11)	60 mp
MNV norovírus (11)	60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11)	60 mp
Rotavírus Wa törzs (11)	30 mp



PROSEPT® Value Wipes

Használatra kész törlőkendők a nem invazív orvostechnikai eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez.

- **Használatra kész nedves törlőkendők**

A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét, amely légúti, szem- és orriritációt okozhat.

- **Erősen telített törlőkendők**

A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt dobozban.

- **Maradék-mentes szárítás**

A fertőtlenítő törlők nem hagynak csíkokat, ezért feleslegessé teszik a további törlőket.

Termékhasználat: Védekezésékként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerezés:

Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 20 cm) *, citrom illattal

PROSEPT® T1 törlőkendő doboz (üres doboz)

Utántöltő tasak 250 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 20 cm), citrom illattal

PROSEPT® T2 törlőkendő doboz (üres doboz)

* 2019. augusztusban érhető el

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtirtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11)	15 mp
BVDV (7,11)	15 mp
Koronavírus (9,11)	15 mp
Hepatitis B vírus (11)	15 mp
Hepatitis C vírus (10,11)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11)	15 mp
HIV (11)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírustörzs (11)	15 mp
Virucid (11,12)	60 mp
5. típusú adenovírus (11)	60 mp
MNV norovírus (11)	60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11)	60 mp
Rotavírus Wa törzs (11)	30 mp



PROSEPT® Luxury Wipes

Vastag, texturált és erősen telített fertőtlenítő törlőkendők a nem invazív orvostechikai eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez.

- **Használatra kész nedves törlőkendők**

A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét, amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

- **Erősen telített törlőkendők**

A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt dobozban.

- **Maradék-mentes szárítás**

A fertőtlenítő törlők nem hagynak csíkokat, ezért feleslegessé teszik a további törlőket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a telercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerezés:

Utántöltő tasak 165 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 18 cm), citrom illattal
PROSEPT® T2 törlőkendő doboz (üres doboz)

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtírtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11)	15 mp
BVDV (7,11)	15 mp
Koronavírus (9,11)	15 mp
Hepatitis B vírus (11)	15 mp
Hepatitis C vírus (10,11)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11)	15 mp
HIV (11)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs(11)	15 mp
Virucid (11,12)	60 mp
5. Típusú adenovírus (11)	60 mp
MNV norovírus (11)	60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11)	60 mp
Rotavírus Wa törzs (11)	30 mp



PROSEPT® Premium Wipes

Rendkívül puha fertőtlenítő törlők a nem invazív orvostechikai eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez.

- **Használatra kész nedves törlőkendők**

A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét, amely légúti, szem- és orriritációt okozhat.

- **Erősen telített törlőkendők**

A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt dobozban.

- **Maradék-mentes szárítás**

A fertőtlenítő törlők nem hagynak csíkokat, ezért feleslegessé teszik a további törlőket.

Termékhasználat: Védekezésékként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerezés:


Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törlőkendővel (19,3 x 21 cm), citrom illattal
PROSEPT® T3 törlőkendő kád (üres kád)

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtírtó (4,6)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11)	15 mp
BVDV (7,11)	15 mp
Koronavírus (9,11)	15 mp
Hepatitis B vírus (11)	15 mp
Hepatitis C vírus (10,11)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11)	15 mp
HIV (11)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (11)	15 mp
Virucid (11,12)	60 mp
5. típusú adenovírus (11)	60 mp
MNV norovírus (11)	60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11)	60 mp
Rotavírus Wa törzs (11)	30 mp



PROSEPT[®] fertőtlenítő kendőinket több, mint 275 anyaggal teszteltük!

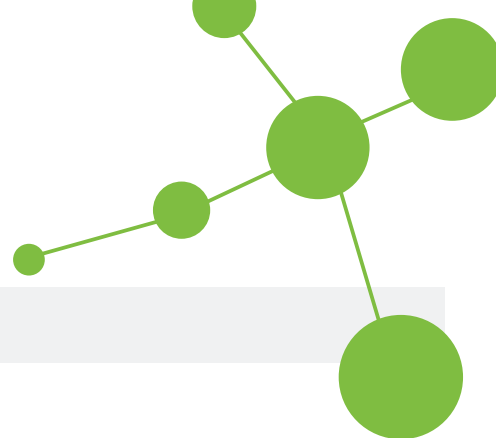

Eredeti	2 hét után Vízzel törölve	2 hét után (PROSEPT [®] Wipes)	Leírás
			Anyag: Műbőr Márkanév: KaVo [®] Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.
			Anyag: Műbőr Márkanév: Planmeca [®] Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.
			Anyag: Műbőr Márkanév: Castellini [®] Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.
			Anyag: Műbőr Márkanév: Anthos [®] Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.
			Anyag: Műbőr Márkanév: Joerg & Sohn Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.





**Orvosi műszerek
fertőtlenítése és tisztítása**

PROSEPT® Fortis

Erőteljes koncentrátum az orvosi és fogászati műszerek gyors fertőtlenítéséhez.

• Erőteljes tisztítószer

A termék erős tisztító tulajdonságai feleslegessé teszik az elő- és utótisztítást.

• Hatékony korróziógátlókat tartalmaz

A fertőtlenítőszer nagyon hatékony korróziógátlókat tartalmaz a rozsdra elleni védelem érdekében, és bizonyos fémeknél kevésbé korrózív, mint a víz.

• Nincs elszíneződés vagy vér rögzítés

Az oldat nem okoz elszíneződést vagy fehérje-rögzítést a műszerekben.

• Használható ultrahangos tisztítóberendezésekben

A termék tisztítóképeségét ultrahangos tisztítóberendezéssel tovább lehet növelni.

• Teljesen virucid

A PROSEPT® Fortis valamennyi baktérium, mikobaktérium, gomba, valamint burkolt és nem burkolt vírus ellen aktív.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen laboratóriumi köpenyt, háztartási kesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja a mérőkupakot. Merítse teljesen a műszereket. Tartsa a műszereket szétválasztva. Gondoskodjon arról, hogy a levegő teljesen kiürüljön az üregekből. Tartsa be a behatási időket. Merítés után az eszközöket alaposan öblítse le vízzel, és szárítsa meg. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a szennyeződés mértékétől függően. Napi csere ajánlott. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Nem kompatibilis az alumíniummal, horganyzott acéllal, poliuretánnal és fluoropolimerekkel.

Összetétel 100 g-ban: 3,6 g didecil-dimetil-ammonium-klorid, 9,1 g alkilamin, tisztítást fokozó anyagok, segédanyagok


Kiszerezés: 2 liter palack mérőkupakkal, 5 literes kanna.

Bizonyított formula

Baktericid (1)	3%-an	5 perc
Antibiotikum-rezisztens bakt. (2)	3%-an	5 perc
Tuberkulocid (3)	3%-an	5 perc
Mycobactericid (3)	3%-an	5 perc
Gombaölő (4)	3%-an	5 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	3%-an	5 perc
Korlátozott spektrumú virucid (6,9)	3%-an	5 perc
BVDV (9)	3%-an	5 perc
Koronavírus (7,9)	3%-an	5 perc
Hepatitis B vírus (9)	3%-an	5 perc
Hepatitis C vírus (8,9)	3%-an	5 perc
I. típusú herpes simplex vírus (9)	3%-an	5 perc
HIV (9)	3%-an	5 perc
H3N2 influenza A vírus (9)	3%-an	5 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9)	3%-an	5 perc
Virucid (9,10)	3%-an	15 perc
5. típusú adenovírus (9)	3%-an	5 perc
MNV norovírus (9)	3%-an	10 perc
I. típusú LSc-2ab poliovírus (9)	3%-an	15 perc



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	4½x  (= 90 ml) 3%
Víz	2910 ml
Idő	15 perc



(1) EN 13727, EN 14562 *, (2) A. baumannii, ESK, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 14562 *, (5) CaDR, (6) aktív minden burkolt vírus ellen, (7) FCov helyettesítő vírus, (8) BVDV helyettesítő vírus, (9) EN 14476, (10) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, * vivőteszt.

PROSEPT® Burs

Korróziógátló, használatra kész megoldás forgó fogászati és sebészeti műszerek fertőtlenítésére és tisztítására.

• Teljesen virucid 30 másodpercen belül

Még a legrezisztensebb vírusok, mint például a poliovírus és az adenovírus ellen is.

• Erőtéljes tisztítószer

A termék erős tisztító tulajdonságai feleslegessé teszik az elő- és utótisztítást.

• Gazdaságos használat

Az oldat akár 1 hétig is használható.

Termékhasználat: Védekezésékként viseljen laboratóriumi köpenyt, háztartási kesztyűt és védőszemüveget. Öntse a kész oldatot a fűrófertőtlenítő dobozba. Merítse teljesen a forgó eszközöket. Tartsa be a behatási időket. Fertőtlenítés után hagyja megszáradni a forgó műszereket. A korrózió elkerülése érdekében ne öblítse le vízzel. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a szennyeződés mértékétől függően. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

Összetétel 100 g-ban: 32 g 2-propanol, 0,7 g fenoxietanol, 0,2 g kvaterner ammóniumvegyületek, lúgok, korróziógátlók, felületaktív anyagok

Kiszerezés: 2 literes flakon, 5 literes kanna

Teljesen virucid

Baktericid (1)	30 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	30 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőölő (4)	30 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	30 mp
Gombaölő (4)	2 perc
Korlátozott spektrumú virucid (7,10)	15 mp
BVDV (10)	15 mp
Koronavírus (8,10)	15 mp
Hepatitis B vírus (10)	15 mp
Hepatitis C vírus (9,10)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10)	15 mp
HIV (10)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (10)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)	15 mp
Vírusos (10,11)	30 mp
5. típusú adenovírus (10)	30 mp
MNV norovírus (10)	30 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (10)	30 mp
SV 40 poliomavírus (6)	30 mp



(1) EN 13727, EN 14561 *, (2) A. baumannii, ESK, Krhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 14562 *, (5) CaDR, (6) RK1 / DVV irányelvek, (7) aktív minden burkolt vírus ellen, (8) FCoV helyettesítő vírus, (9) BVDV helyettesítő vírus, (10) EN 14476, (11) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, * hordozó teszt.

PROSEPT® Pera

Koncentrált kémiai sterilizáló por orvosi eszközök fertőtlenítéséhez, hideg sterilizálásához és tisztításához.

• Hideg sterilizálás

10 percen belül aktív baktériumok ellen, ideértve a tuberkulózist, gombákat, burkolt vírusokat, nem burkolt vírusokat és spórokat.

• Aldehyd és alkilamin mentes

Alapos fertőtlenítés egészségügyi kockázat nélkül.

• Nem rákkeltő

A fertőtlenítőszer nem tartalmaz karcinogén anyagokat, például aldehideket.

• Magas anyag kompatibilitás

Alkalmos hőérzékeny eszközök, például endoszkópok fertőtlenítésére.


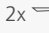
Termékhasználat: Védekezésként viseljen laboratóriumi köpenyt, háztartási kesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. Használja a mellékelt mérőkanalat és langyos vizet (35–40° C) a perecetsav oldat előállításához. Győződjön meg arról, hogy a portartó fedele biztonságosan be van zárva. Rendszeresen keverjük 15 percig. Merítse el teljesen a műszereket. Tartsa a műszereket szétválasztva. Gondoskodjon arról, hogy a levegő teljesen kiürüljön az üregből. Tartsa be a behatási időket. A fertőtlenítés után az eszközöket alaposan öblítse le steril vízzel, és szárítsa meg. Cserélje ki a munkaoldatot naponta, mivel ez 24 órán belül hatástalanná válik. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Ne használja réz, sárgaréz és sérült krómzott felületeken.

Összetétel 100 g-ban: 45 g nátrium-perkarbonát, 25 g tetraacetil-etilén-diamin, 24 g citromsav, felületaktív anyagok, korróziógátlók

Kiszerezés: 1 kg-os doboz mérőkanállal



Adagolás

Mérőkanál (1 = 10 g)	1x  1%	2x  2%
Víz (35 – 40 °C)	990 ml	980 ml
Idő	30 perc	10 perc

Gombaölő

Baktericid (1)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
Antibiotikum rezisztens baktériumok (2)	1%-an 10perc / 2%-an	1 perc
Tuberkulocid (3)	1% -an 15 perc / 2%-an	5 perc
Mycobactericid (3)	1%-an 15 perc / 2%-an	5 perc
Élesztőtirtó (4)	1%-an 10 perc / 2%-an	1 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	1%-an 10 perc / 2%-an	1 perc
Gombaölő (4)	1%-an 30 perc / 2%-an	10 perc
Korlátozott spektrum virucid(6,9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
BVDV (9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
Koronavírus (7,9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
Hepatitis B vírus (9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
Hepatitis C vírus (8,9%)	1% -an 5perc / 2% -an	1perc
1. típusú herpes simplex vírus (9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
HIV (9)	1% -an 5 perc / 2%-an	1 perc
A H3N2 influenza A vírus (9)	1% -an	1perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
Virucid (9,10)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
5. típusú adenovírus (9)	1% -an	1 perc
1. típusú szarvasmarha enterovírus (12)	1% -an 5 perc / 2%-an	1 perc
MNV norovírus (9)	1%-an	1 perc
1. típusú poliovírus LSc-2ab (9)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc
Sporicid (11)	1%-an 5 perc / 2%-an	1 perc



PROSEPT® Sonic

Folyékony koncentrátum a szennyezett fogászati és sebészeti műszerek alapos és átfogó tisztításához az ultrahangos tisztító berendezésben.

- **Erőteljes tisztítószer**

A termék erős tisztító tulajdonságai feleslegessé teszik az elő- és utótisztítást.

- **Kiváló tisztító tulajdonságok**

Eltávolítja a makacs maradványokat is, mint például a vér, a nyál vagy gipszmaradványok.

- **Egyszerű alkalmazás**

A palack kupakja mennyiségi jelöléseket tartalmaz a gyors és egyszerű adagoláshoz.

Termékhasználat: Védekezőként viseljen háztartási kesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja a mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Merítse el teljesen a műszereket. Tartsa be a behatási időket. Merítés után az eszközöket alaposan öblítse le vízzel, és szárítsa meg. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a szennyeződés mértékétől függően. Napi csere ajánlott. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Ne használja a színekkel ellátott műszereken és a természetes sörtével, nejlomból vagy alumíniumból készült / ezekkel felszerelt műszereken.

Összetétel 100 g-ban: 16 g kálium-hidroxid, komplexképző szer, speciális felületaktív anyagok

Kiszerezés: 1 literes palack mérőkupakkal

Erőteljes tisztító



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	7½x ☐ (= 150 ml) 5%
Víz	2850 ml
Idő	30 perc



Fontos tanácsok !!

- Ne használja a színekkel ellátott műszerekhez és a természetes sörtékből, nyolból vagy alumíniumból készült / azokkal készített műszerekhez
- Ne használjon fémkeféket, mivel ezek károsíthatják a műszer ötvözetét.
- A maximális állási idő 7 nap. A szennyeződés mértékétől függően az oldat napi cseréjét javasoljuk.





**Fogászati lenyomatok
fertőtlenítése**

PROSEPT® Impression

Innovatív folyékony koncentrátum a fogászati lenyomatok gyors hatású és gazdaságos fertőtlenítéséhez.

- **Nem változtatja meg a fogászati lenyomatok formáját vagy méretét**
A fertőtlenítőszernek nincs negatív hatása a fogászati lenyomatok formájára vagy stabilitására.
- **Rövid expozíciós idő**
A rövid expozíciós idő növeli a munkabiztonságot, mivel a fertőtlenítőszer mindössze 2 perc alatt hatásos.
- **Gazdaságos használni**
Az oldat akár 1 hétig is használható.
- **Egyszerű alkalmazás**
A fertőtlenítőszer-koncentrátum gyors és egyszerű adagolására használja a kupakban feltüntetett mennyiségeket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Merítse el a lenyomat anyagokat teljesen. Gondoskodjon arról, hogy teljesen kiürítse a levegőt az üregekből. Tartsa be a behatási időket. Fertőtlenítés után az alapanyagokat alaposan öblítse le hideg vízzel. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a szennyeződés mértékétől függően. Napi csere ajánlott. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását.

Összetétel 100 g-ban: 30,0 g benzalkónium-klorid, felületaktív anyagok, tisztítást fokozó segédanyagok.

Kiszerezés: 1 literes palack mérőkupakkal

Szuper gazdaságos

Baktericid (1)	1%-an 2 perc/3%-an 1 perc
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	1%-an 2 perc/3%-an 1 perc
Élesztőtírtó szerek (3)	1%-an 2 perc/3%-an 1 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (4)	1%-an 2 perc/3%-an 1 perc
Korlátozott spektrum virucid (6,9)	1%-an 1 perc
BVDV (9)	1%-an 1 perc
Koronavírus (7,9)	1%-an 1 perc
Hepatitis B vírus (9)	1%-an 1 perc
Hepatitis C vírus (8,9)	1%-an 1 perc
1. típusú herpes simplex vírus (9)	1%-an 1 perc
HIV (9)	1%-an 1 perc
A H3N2 influenza A vírus (9)	1%-an 1 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9)	1%-an 1 perc
5. típusú adenovírus (9)	1%-an 2 perc
MNV norovírus (9)	1%-an 2 perc
A rotavírus Wa törzse (5)	3%-an 1 perc



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	½ (= 10 ml) 1%	1½x (= 30 ml) 3%
Víz	990 ml	970 ml
Idő	2 perc	1 perc



PROSEPT® Impression S

Használatra kész, aldehidmentes spray-fertőtlenítőszer poliéterből, poliszulfidból, alginátból, valamint A- és C-szilikonból készült fogászati lenyomatokhoz.

- **Széles effektív spektrum**

Minden baktériummal szemben aktív, ideértve a tuberkulózist és vírusokat okozó baktériumokat is.

- **Rövid expozíciós idő**

Aktív 1 percen belül.

- **Nem változtatja meg a fogászati benyomások formáját vagy méretét**

A fertőtlenítőszernek nincs negatív hatása a fogászati lenyomatok formájára vagy stabilitására.

Termékhasználat: Védelemként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget. Öblítse ki a lenyomatot csapvízzel a beteg szájából történő eltávolítása után. Szórja be a lenyomatot a fertőtlenítőszerrel. Tartsa be a behatási időket. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását.

Összetétel 100 g-ban: 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g kvaterner ammóniumvegyületek

Kiszerezés: 1 literes palack permetezőfejjel

Gyors és könnyű

Baktericid (1)	60 mp
Antibiotikumokkal szemben rez.bakt. (2)	60 mp
Tuberkulocid (3)	60 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőtirtó (4)	60 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	60 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10)	15 mp
BVDV (10)	15 mp
Koronavírus (8,10)	15 mp
Hepatitis B vírus (10%)	15 mp
Hepatitis C vírus (9,10)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10)	15 mp
HIV (10)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (10)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)	15 mp
Vírusos (10,11)	60 mp
5. típusú adenovírus (10)	60 mp
MNV norovírus (10)	30 mp
1. típusú LS-2ab poliovírus (10)	60 mp



(1) EN 13727, EN 13697 *, EN 14561 *, (2) A. baumannii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 13697 *, EN 14562 *, (5) CaDR, (6) RRI / DVV irányelvek, (7) aktív az összes burkolt vírus ellen, (8) FCoV helyettesítő vírus, (9) BVDV helyettesítő vírus, (10) EN 14476, (11) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen * vivőteszt.



Szívórendszerek
fertőtlenítése és tisztítása

PROSEPT® Jet D

Folyékony koncentrátum a szívégegyesek hatékony fertőtlenítéséhez és tisztításához.

• Bizonyított formula

A fogorvosok szerinte a világon teljes elégedettséggel használják naponta ezt a jól bevált készítményt szívégegyesek fertőtlenítéséhez és tisztításához.

• Magas hozamú koncentrátum

2 liter fertőtlenítőszer-koncentrátum 100 liter működő oldatot eredményez.

• Egyszerű alkalmazás

A fertőtlenítőszer-koncentrátumok gyors és egyszerű adagolására a mérőkupak feltünteti a mennyiségeket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja a mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Szívjon be 1,5 liter oldatot az egységbe. Öntsön 0,5 liter oldatot le a köpöcsészén. Hagyja hatni az oldatot. Alaposan öblítse át a készüléket vízzel.

Összetétel 100 g-ban: 2,475 g N- (3-amino-propil) -N-dodecil-propán-1,3-diamin, 7,5 g kvaterner ammóniumvegyületek, habzágátlók, speciális felületaktív anyagok.

Kiszerezés: 2 literes palack mérőkupakkal, 5 literes kanna

Bizonyított formula

Baktericid (1)	2%-an 15 perc
Antibiotikum-rezisztens baktérium. (2)	2%-an 15 perc
Élesztőtírtó (3)	2%-an 15 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (4)	2%-an 15 perc
Korlátozott spektrumú virucid (5,8)	2%-an 15 perc
BVDV (8)	2%-an 15 perc
Koronavírus (6,8)	2%-an 15 perc
Hepatitis B vírus (8)	2%-an 15 perc
Hepatitis C vírus (7,8)	2%-an 15 perc
1. típusú herpes simplex vírus (8)	2%-an 15 perc
HIV (8)	2%-an 15 perc
H3N2 influenza A vírus (8)	2%-an 15 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (8)	2%-an 15 perc
Virucid (8,9)	2%-an 60 perc
5. típusú adenovírus (8)	2%-an 30 perc
MNV norovírus (8)	2%-an 60 perc
1. típusú LSc-2ab poliovírus (8)	2%-an 30 perc



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	2x ☐ (= 40 ml) 2%
Víz	1960 ml
Idő	60 perc



PROSEPT® Jet Forte

Folyékony koncentrátum a szívóegységek alapos tisztításához.

- **Magas hozamú koncentrátum**
2 liter koncentrátum 100 liter munkaoldatot eredményez.
- **Kiváló tisztítóképesség**
Megszünteti a biofilm lerakódást és a rossz szagokat, ezáltal biztosítva a szívóegység megbízható működését.
- **Nem habzik**
Kíméletes az elszívókhoz és a tömlőkhöz.
- **Egyszerű alkalmazás**
A fertőtlenítőszer-koncentrátum gyors és egyszerű adagolására a mérőkupak feltünteti a mennyiségeket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja a mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Szívjon be 1,5 liter oldatot az egységbe. Öntsön 0,5 liter oldatot le a köpöcsészébe. Hagyja hatni az oldatot. Ezután alaposan öblítse át a készüléket vízzel.

Összetétel 100 g-ban: lúgos tisztítószeresek, habzágátló szerek, speciális felületaktív anyagok

Kiszerezés: 2 literes palack mérőkupakkal, 5 literes kanna

Erőteljes tisztító



Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml)	2x ☐ (= 40 ml) 2%
Víz	1960 ml
Idő	30 perc





**Kézmosó -és
fertőtlenítő termékek**

PROSEPT® Med

Használatra kész kézfertőtlenítő az átfogó, mégis gyengéd kéz- és alkar-fertőtlenítéshez.

- **Rövid expozíciós idő**

30 másodpercen belül fellép a baktériumok és a burkolt vírusok ellen.

- **Kiváló bőrsemleges hatóanyagok**

A kézfertőtlenítő hidratáló anyagokat tartalmaz, hogy táplálja és hidratálja a bőrt.

- **Bőrápoló, hidratáló és tápláló összetevőket tartalmaz**

A kezét puhán és simán tartja.

Termékhasználat: A fertőtlenítőszer felhordása előtt távolítsa el az órákat, gyűrűket és egyéb ékszereket. Vigye a szükséges mennyiséget a száraz és tiszta kezekre. A kéz higiénikus fertőtlenítéséhez: dörzsölje 3 ml-t 30 másodpercre a kezére és a körmére. A műtéti kézfertőtlenítéshez: dörzsölje kétszer 5 ml-t 3 percig a kezére, körmére és az alkarjára. Dörzsölje össze a kezeket a kézfertőtlenítés 6-lépéses technikájával (EN 1500) összhangban, és kövesse az érintkezési időket. Csúsztassa a kesztyűt a fertőtlenített, szárított kezekre, és végezzen higiénikus fertőtlenítési eljárást a nem steril kesztyűk fertőtlenítéséhez.

Összetétel 100 g-ban: 44,9 g 2-propanol, 30,0 g 1-propanol, 0,15 g didecil-dimetilmonónium-klorid, víz, természetes hidratáló anyagok, parfüm

Kiszérelés: 500 ml-es palack pumpával, 500 ml-es palack (EURO), 1 liter palack (EURO), 1 liter újratöltő patron a myArtisto adagolóhoz

Alkalmazási terület

Higiénikus kézfertőtlenítés EN 1500	30 mp
Sebészeti kézfertőtlenítés EN 12791	90 mp

Gyengéd

Baktericid (1)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	30 mp
Mycobactericid (3)	30 mp
Élesztőtírtó (4)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (6,9)	15 mp
BVDV (9)	15 mp
Koronavírus (7,9)	15 mp
Hepatitis B vírus (9)	15 mp
Hepatitis C vírus (8,9)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (9)	15 mp
HIV (9)	15 mp
A H3N2 influenza A vírus (9)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9)	15 mp
MNV norovírus (9)	60 mp



PROSEPT® Gel

Hidroalkoholos gél higiénikus (30 másodperc) és műtési (90 másodperc) kézfertőtlenítéshez bőrvédőszerekkel és vitaminokkal.

- **Széles effektív spektrum**

60 másodpercen belül aktív baktériumok, mycobacteriumok, gombák és vírusok (beleértve a norovírust) ellen.

- **Nem tapadó készítmény**

Ez a nem tapadó készítmény nem hagy maradékot a kezén vagy a kesztyűjén.

- **Öregedésgátló összetevőket tartalmaz**

A kézi fertőtlenítőszer öregedésgátló összetevőket, hidratálószerket, bőrpuhító szereket, bőrvédő szereket, vitaminokat és nyugtató szereket tartalmaz a bőr maximális védelme érdekében.

Termékhasználat: A fertőtlenítőszer felhordása előtt távolítsa el az órákat, gyűrűket és egyéb ékszereket. Vigye fel a szükséges mennyiséget a száraz és tiszta kezekre. A kéz higiénikus fertőtlenítéséhez: dörzsöljön 3 ml-t 30 másodpercre a kezére és a körömrre. A műtési kézfertőtlenítéshez: dörzsöljön kétszer 5 ml-t 90 másodpercre a kezére, körmére és az alkarjára. Dörzsölje össze a kezeket a kézfertőtlenítés 6-lépéses technikájával (EN 1500) összhangban, és tartsa be a behatási időket.

Összetétel 100 g-ban: 52,8 g etanol, 19,0 g 1-propanol, 2,8 g 2-propanol, hidratáló szerek, bőrpuhító szerek, E-vitamin-acetát, pantenol, bisabolol, zselésítőszerek.

Kiszerezés: 100 ml-es palack flip-top kupakkal, 500 ml-es palack pumpával, 500 ml-es palack (EURO), 1 liter palack (EURO), 1 liter újratöltő patron a myArtisto adagolóhoz.

Alkalmazási terület

Higiénikus kézfertőtlenítés EN 1500	30 mp
Sebészeti kézfertőtlenítés EN 12791	90 mp

Teljesen virucid

Baktericid (1)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)	15 mp
Tuberkulocid (3)	30 mp
Mycobactericid (3)	60 mp
Élesztőirtó (4)	15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)	15 mp
Gombaölő (4)	60 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10)	15 mp
BVDV (6,10)	15 mp
Koronavírus (8,10)	15 mp
Hepatitis B vírus (10)	15 mp
Hepatitis C vírus (9,10)	15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (6,10)	15 mp
HIV (10)	15 mp
H3N2 influenza A vírus (10)	15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)	15 mp
Virucid (10,11)	5 p
5. típusú adenovírus (10)	60 mp
MNV norovírus (10)	15 mp
1. típusú LS-2ab poliovírus (10)	5 p
Rotavírus (6)	15 mp



A kézfertőtlenítés egyszerű lépései



1 Vigyen fel 1 x 3 ml PROSEPT® Med / Gel-t a tenyerére. Ne aktiválja az adagolót kézzel, hanem inkább használjon alternatív módszert, például könyökcart vagy lábpedált.



2 Használja a kézfertőtlenítés 6 lépéses módszerét az EN 1500 szabvány szerint.



3 A jobb tenyér a bal kéz hátulja felett (és fordítva).



4 Tenyér-tenyér összefűzött ujjakkal.



5 Az ujjak felső oldala az ellenkező kéz tenyerével szemben (mindkét kéz egyszerre).



6 A jobb hüvelykujj körbedörzsölése a zárt bal öklöben (és fordítva).



7 A jobb kéz zárt ujjhegyeinek körkörös dörzsölése a bal tenyérben (és fordítva).



8 Ismételje meg a 2-7 lépést 30 másodpercig. A bőrnek nedvesnek kell maradnia a teljes fertőtlenítés ideje alatt. Ha szükséges, tegyen újra a kezére PROSEPT® Med / Gel-t.



9 Vegye figyelembe az expozíciós időt. 30 másodperc a kéz higiéniás fertőtlenítéséhez és 2 x 3 perc a kéz sebészeti fertőtlenítéséhez.

PROSEPT® Hand Cream

Gazdaságos kézkrem a igénybe vett és kiszáradt kezekre.

- **Bőr hidratáló összetevőket tartalmaz**

A hidratáló szerek a kezét puhán és simán tartják.

- **Nem zsíros**

A kézkrem nem hagy olajos vagy zsíros maradványokat a bőrön.

- **Kellemes citrom illatú**

Termékhasználat: Nedvesítse a kezét. Vigye fel krémet a kezére, és habosítsa fel alaposan. Alaposan öblítse le a kezét folyó víz alatt. Szárítsa meg a kezét eldobható ruhával.

Összetevők: VÍZ, DECYL OLEATE, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, GLICERIN, GLYCERYL STEARATE SE, FENOXYETHANOL, PARFÜM, CITROMSAV

Kiszerezés: 230 ml-es adagolópalack pumpával

Gyengéd



Fontos tanácsok

- Soha ne tegyen krémet kézre közvetlenül a fertőtlenítés előtt vagy után. Ellenkező esetben negatív hatással lehet a fertőtlenítésre.
- Kerülje a kesztyű felhelyezése előtt a kézkrem használatát, mivel ez befolyásolhatja a kesztyű integritását.



PROSEPT® Hand Wash

Gyengéd kézmosó krém a száraz és kirepedezett bőrre.

• Bőr-semleges pH-érték

A bőr semleges pH-értéke segít fenntartani a bőr természetes védőrétegét.

• Kíméletes tisztító krém

Ez a kíméletes kézmosó krém finoman tisztítja, miközben intenzíven hidratálja a bőrt, ezáltal ideális a gyakori használatra.

• Bőrápoló anyagokat tartalmaz

A bőrápoló szerek segítik a bőrt az optimális nedvesség-egyensúly fenntartásában, ezáltal a kezed puhán és simán tartja.

Termékhasználat: Nedvesítse be a kezét. Vigye fel krémet a kezére, és habosítsa fel rendszeresen. Alaposan öblítse le a kezét folyó víz alatt. Szárítsa meg a kezét eldobható ruhával.

Összetevők: VÍZ, NÁTRIUM-LAURETS-SZULFÁT, KOKAMIDOPROPIL-BETAIN, DECIL-GLUKOZID, GLICERIN, NÁTRIUM-KLORID, KOKO-GLUKOZID, GLICERIL-OLEÁT, NÁTRIUM-benzoát, CITRICA, PAROPINUM-ALKATUM-ALP. KIVONAT, PARFÜM, CI 14720

Kiszérelés: 500 ml-es palack pumpával, 500 ml-es palack (EURO), 1 liter palack (EURO), 1 liter újratöltő patron a myArtisto adagolóhoz, 2 literes palack mérőkupakkal

Gyengéd



Fontos tanácsok

- Ne mosson kezet forró vízzel, mivel ez elősegíti a transzepidermális vízvesztést és ösztönzi a bőr kiszáradását és a bőrrirritáció kialakulását.
- Ne viseljen ékszereket (például gyűrűket, karórákat) a kezén vagy az alkaron.
- A körmöknek a lehető legrövidebbeknek kell lenniük, és nem szabad túlmutatniuk az ujjhegyen. Soha ne viseljen műkörmöket és körömlakkot.





Nyomógombos adagoló: myArtisto MS-3 fertőtlenítő adagoló

A PROSEPT® myArtisto MS-3 fertőtlenítő adagoló egy nyomógombos szappan és kézfertőtlenítő adagoló, amely ideális egészségügyi ellátókhöz, például kórházakhoz és klinikákhoz, valamint konyhákhöz és éttermekhez, nappali ellátó központokhoz, fitness és tornatermekhez vagy nyilvános épületekhez való használatra. Az adagolónak három extra nagy ablaka van, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a megjelenés testreszabását a grafika helyett. A fertőtlenítő adagoló kompatibilis a kézfertőtlenítővel, kézmosókkal, folyékony kézzappanokkal és kézkrémekkel. A PROSEPT® myArtisto MS-3 fertőtlenítő adagoló könnyedén falra szerelhető a mellékelt kétoldalas ragasztószalag vagy falkonzol segítségével. Az egység vandálbiztos biztonsági zárral és kulccsal rendelkezik. Opcionális kar- / könyök adagoló áll rendelkezésre azokon a területeken, ahol a keresztzennyezés veszélyt jelenthet.



Érintésmentes adagoló: myArtisto AS-3 fertőtlenítő adagoló

A PROSEPT® myArtisto AS-3 fertőtlenítő adagoló érintésmentes szappan és kézfertőtlenítő adagoló, amely ideális egészségügyi ellátókhöz, például kórházakhoz és klinikákhoz történő alkalmazásra, ahol a keresztfertőzés kockázata különösen magas. Az adagolónak három extra nagy ablaka van, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a megjelenés testreszabását a grafika helyett. A készülék a beállítástól függően automatikusan 1,5 ml vagy 3 ml folyadékot adagol. A fertőtlenítő adagoló kompatibilis a kézfertőtlenítővel, kézmosókkal, folyékony kézzappanokkal és kézkrémekkel. Az adagolót négy AA elem működteti, amelyek több mint 10 000 ciklusig tartanak (az elemek nem tartoznak a csomaghoz). Opcionálisan kapható hálózati adapter. A PROSEPT® myArtisto AS-3 fertőtlenítő adagoló könnyedén falra szerelhető a mellékelt kétoldalas ragasztószalag vagy falkonzol segítségével. Az egység vandálbiztos biztonsági zárral és kulccsal rendelkezik.



myArtisto csepegtető tálca

A myArtisto csepegtető tálcat úgy tervezték, hogy megvédje padlóit és falait azáltal, hogy megóvjva őket a felesleges fertőtlenítőktől. A rögzíthető csepegtető tálca szerszám nélkül egyszerűen rögzíthető a myArtisto Sanitizer adagolójának aljára.



Kar / könyök adagoló

A myArtisto MS-3 Sanitizer kar / könyök adagoló átalakítja a nyomógombos adagolót karral működtetett adagolóvá. A kar rozsdamentes acélból készül, és szerszámok nélkül könnyen rögzíthető.



**Mosodai
fertőtlenítés**

PROSEPT® Laundry

Nagyteljesítményű mosodai fertőtlenítőszer. Teljesen virucid, baktericid, tuberkulocid és fungicid.

- **Széles effektív spektrum**

A baktériumok, mikobaktériumok, gombák, valamint burkolt és nem burkolt vírusok ellen aktív.

- **Biológiailag lebomló**

Az oldat biológiailag lebomló és nem befolyásolja negatívan az ökoszisztémát.

- **Megfelel az európai szabványoknak**

Termékhasználat:

Kézi mosás: Adjon hozzá 100 g PROSEPT® mosószert 10 liter meleg vízhez (35–40 °C), és várjon 15 percig. Adja hozzá a tetszőlegesen választott mosószert a gyártó ajánlása szerint. Teljesen merítse el a textíliát, és hagyja 30 percig hatni. A textíliákat a szokásos módon mossa és szárítsa. Mindig tartsa be a személyes higiénia szabályait: Az önvédelem érdekében viseljen egyszer használatos kesztyűt, kerülje a szennyezett anyaggal való közvetlen érintkezést, és a szennyezett textíliák kezelése után fertőtlenítse a kezét. Óvja a kezelt textíliákat a szennyeződéstől.

Mosógép: Állítsa a hőmérsékletet 40 ° C-ra, és válasszon előmosásos programot. Adjon hozzá a választott poros mosószert a mosószert-fiók fő mosó- és előmosó rekeszéhez a gyártó ajánlása szerint. Adjon 100 g PROSEPT® Laundry-t a főmosó rekeszhez. A textíliákat a szokásos módon mossa meg és szárítsa meg (ne terhelje túl).

Összetétel 100 g-ban: 30-50% oxigén alapú fehérítőszer, <5% nemionos felületaktív anyagok, foszfónátok. Egyéb összetevők: TAED, citromsav

Kiszerezés: 5 kg-os doboz adagoló kanállal

Gombaölő

Baktericid (1)	30 perc
Tuberkulocid (2)	30 perc
Mycobactericid (2)	30 perc
Gombaölő (3)	30 perc
Virucid (4,5)	30 perc
Sporicid (6)	30 perc



Adagolás

1 kanál = 50 g		
Mosógépben:	100 g /	30 perc
Kézi mosásnál:	100 g / 10 litre	30 perc



Kiegészítők és alkalmazási segédeszközök



PROSEPT® Burs Soaking Tray

Kis áztató tálca forgó eszközök fertőtlenítéséhez.



PROSEPT® Soaking Tray

Áztató tálca az orvosi műszerek fertőtlenítéséhez és tisztításához.



PROSEPT® Impression Soaking Tray

Áztató tálca a fogászati lenyomatok fertőtlenítéséhez és tisztításához.



PROSEPT® 20 ml Canister Pump

Tartályszivattyú 20 ml-es kimenő mennyiséggel 5 és 10 literes kannákhoz DIN 51 menettel.



43

PROSEPT® Trigger Sprayer I1

Európában gyártott, 1,3 ml-es kimenő mennyiségű szórófej 28/410 menetes palackokhoz.



PROSEPT® Trigger Sprayer C1

1,3 ml-es kimenő mennyiségű szórófej 28/410 menetes palackokhoz.



PROSEPT® 20 ml Dosing Pump

Adagoló pumpa 20 ml-es adagolással 1 és 2 literes palackokra.



PROSEPT® 3 ml Dosing Pump

Adagolószivattyú 3 ml-es adagolással 500 ml-es és 1 literes palackokhoz, 28/410-es menettel.



PROSEPT® Canister Tap

Tartálycsap 5 és 10 literes kannákhoz DIN 51 menettel.



PROSEPT® Wipes Tub T1

Alkalmas: PROSEPT® törülközőkhöz (14,5 x 20 cm, 120 db)

: PROSEPT® Value törülközők (14,5 x 20 cm, * 120 db)



*2019. augusztusban kapható

PROSEPT® Wipes Tub T2

Használható: PROSEPT® Jumbo törülközőkhöz (14,5 x 40 cm, 100 db)

: PROSEPT® Value törülközőkhöz (14,5 x 20 cm, 250 db)

: PROSEPT® Luxury törülközőkhöz (14,5 x 18 cm, 165 db)



PROSEPT® Wipes Tub T3

Használható: PROSEPT® Value törülközőkhöz (19,3 x 25 cm, 225 db)

: PROSEPT® Luxury törülközőkhöz (19,3 x 24 cm, 165 db)

: PROSEPT® Premium törülközőkhöz (19,3 x 21 cm, 120 db)



Ha bármilyen kérdése lenne a fertőtlenítéssel és a fertőtlenítő szerekkel kapcsolatban, bátran keressen minket:
MEDent Europe Kft. 1045 Bp., Berni utca 1/C www.medent.hu Tel.: +36 70 782 3173

 Fertőtlenítőszer minden területre!

Kizárólagos Magyarországi importőr:

MEDent Europe Kft.
1045 Bp., Berni utca 1/C
www.medent.hu
Tel.: +36 70 782 3173